

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/katarek-vertical-zestaw-aspirator-odciagacz-kataru-adapter-do-odkurzaczy-pionowych-p-56557.html>



## Katarek Vertical zestaw Aspirator odciągacz kataru + Adapter do odkurzaczy pionowych

Cena	<b>69,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>99,00 zł</b>
Kod EAN	<b>5905279336339</b>
Producent	<b>Illes Csok es Tsa</b>

### Opis produktu

#### Katarek Vertical - Stawiamy katar do pionu!

Jeśli szukacie skutecznego rozwiązania na katar u maluszka i posiadacie odkurzaczy pionowy o mocy powyżej 150 W, zestaw Katarek Vertical będzie dla Was idealnym wyborem. Połączenie cenionego aspiratora Katarek Plus z innowacyjnym adapterem do odkurzaczy pionowych to niezastąpiona pomoc w walce z katarą i infekcjami.

#### Elastyczne rozwiązanie na katar

Katarek Vertical to zestaw na katar do odkurzaczy pionowych, w którego skład wchodzi: Katarek Adapter do odkurzaczy pionowych oraz Katarek Plus aspirator kataru. Elastyczny adapter dopasowuje się do odkurzaczy pionowych z otworami o różnych kształtach, umożliwiając podłączenie aspiratora. Aspirator usuwa wydzielinę z nosa dziecka, a siła ssania odkurzacza jest odpowiednio zredukowana w komorze aspiratora, co zapewnia dziecku odpowiedni komfort. Adapter Katarek z powodów technicznych nie zapewnia prawidłowego działania z odkurzaczymi marki Samsung i VAX .

#### Katarek Vertical to wiele korzyści dla Was i Waszego dziecka:

- **Elastyczny:** dopasuje się do większości modeli odkurzaczy pionowych.
- **Gotowe rozwiązanie:** wystarczy podłączyć aspirator kataru do odkurzacza pionowego przy pomocy adaptera.
- **Innowacyjny Adapter:** wykonany z elastycznego materiału, dopasowuje się do otworów o różnych kształtach.
- **„Kultowy” Katarek Plus:** najpopularniejszy na rynku aspirator kataru, który skutecznie, szybko i bezpiecznie usunie zalegający w nosku dziecka katar.
- **Bezpieczeństwo:** Katarek Plus jest certyfikowanym wyrobem medycznym, a Katarek Adapter do odkurzaczy pionowych – przetestowanym wyposażeniem wyrobu medycznego.
- **Łatwe czyszczenie:** aspirator Katarek Plus ma rozkręconą komorę, którą można łatwo czyścić dołączoną do niego szczoteczką. Do czyszczenia Adaptera wystarczy użyć łagodnego roztworu mydła i wody.
- **Przydatne akcesoria:** z Katarkiem Plus otrzymujesz również 2 końcówki aspiratora i szczoteczkę.

#### ZASTOSOWANIE:

Katarek Plus to wyrób medyczny, który dzięki Adapterowi można podłączyć do odkurzaczy pionowych, w celu usunięcia wydzieliny z jamy nosowej u niemowląt i dzieci (już od 1 dnia ich życia).

#### Zawartość opakowania:

- 1x Katarek Adapter do odkurzaczy pionowych
- 1x aspirator Katarek z rozkręcaną komorą ułatwiającą czyszczenie,
- 2x końcówka do aspiratora
- 1x szczoteczka do czyszczenia

#### UWAGA:

Przed zakupem upewnij się, że Twój odkurzaczy nie znajduje się na liście modeli, z którymi adapter nie współpracuje poprawnie. Adapter Katarek z powodów technicznych nie zapewnia prawidłowego działania z odkurzaczymi marki Samsung i VAX. Upewnij się, że Twój odkurzaczy ma moc co najmniej 150W. Upewnij się, że szerokość otworu odkurzacza mieści się w przedziale od 28 do 41mm. Zablokuj dłonią na kilka sekund (najlepiej na czas jaki zwykle odciągasz wydzielinę) otwór ssący w odkurzaczu. Jeżeli urządzenie wyłączy się samoczynnie lub zacznie nieprawidłowo pracować, jest bardzo prawdopodobne, że ten typ odkurzacza nie będzie współpracować z Adapterem.

---

Przed rozpoczęciem aspiracji upewnij się, że:  
odkurzacz jest w pełni naładowany  
pojemnik odkurzacza jest pusty  
otwory boczne na adapterze nie są zasłonięte

Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu mocy odkurzacza pionowego i stopniowo ją zwiększaj o ile jest to niezbędne. Zaleca się przetestowanie wybranego trybu na delikatnym obszarze skóry, np. dłoni, aby upewnić się, że ustawienia są optymalne. Nie odsysać wydzieliny dłużej niż 5 sekund. Ściśle przestrzegać instrukcji zarówno adaptera, jak i aspiratora Katarek.

### **Sposób montażu**

1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że nie ma żadnych obiektów, które mogą blokować przepływ powietrza w otworze jednostki centralnej odkurzacza pionowego, adapterze oraz aspiratorze Katarek. W razie potrzeby usuń te elementy.
2. Doradzamy opróżnienie zbiornika odkurzacza oraz pracę na w pełni naładowanej baterii w celu osiągnięcia najlepszych parametrów działania wyrobu.
3. Wsuń adapter do otworu centralnej jednostki odkurzacza pionowego. W przypadku podłużnego otworu, delikatnie ściśnij korek adaptera, aby ułatwić montaż. Upewnij się, że adapter jest prawidłowo osadzony, w sposób uszczelniający połączenie i nie wypada samoczynnie.
4. Połóż jednostkę centralną odkurzacza pionowego w dogodnej pozycji, aby mieć łatwy dostęp do sterowania odkurzaczem i aspiratorem. Ułożenie jednostki centralnej odkurzacza musi zapewniać stabilną oraz bezpieczną pracę. Upewnij się, czy jednostka centralna odkurzacza nie spadnie lub nie wywróci się podczas pracy.

### **Podłączenie aspiratora**

1. Montaż aspiratora do Katarka Adaptera do odkurzaczy pionowych
2. Zamocuj stożkową część aspiratora na końcówkę adaptera.
3. Upewnij się, że część aspiratora jest szczelnie zamocowana na końcówce stożek KATARKA ADAPTERA do odkurzaczy pionowych i nie wypadnie samoczynnie.
4. Sprawdź, czy otwory boczne KATARKA ADAPTERA do odkurzaczy pionowych nie są zasłonięte.
5. Złóż pozostałe części aspiratora zgodnie z jego instrukcją użycia

### **Specyfikacja**

- Zawartość opakowania - Katarek Adapter do odkurzaczy pionowych, Katarek Plus aspirator kataru (aspirator z rozkręcaną komorą ułatwiającą czyszczenie, 2 końcówki, szczoteczka)
- Zastosowanie adaptera - Podłączanie aspiratorów Katarek do odkurzaczy pionowych
- Zastosowanie aspiratora - Aspirator przeznaczony do odciągania wydzieliny z nosa dziecka
- Producent adaptera - Duna sp. z o.o.
- Producent aspiratora - Illes Csok es Tsa 1146 Budapest, Ajtosi Durer sor 37 office@babyvac.eu
- Importer/Dystrybutor aspiratora - Duna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13/1, 30-701 Kraków biuro2@duna.biz.pl
- Adapter pasuje do aspiratorów - Katarek Simple, Standard, Plus, Complete i Travel
- Przeciwwskazania i zalecenia użytkownika aspiratora - W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z nosa należy poprosić o poradę medyczną. Jeśli po użyciu w okolicach noska dziecka nos dziecka zauważysz alergiczną wysypkę lub zaczerwienienie, przestań korzystać z urządzenia. Poproś o pomoc medyczną. Gdy jest stosowany u kilku dzieci, zaleca się stosowanie osobnych końcówek dla każdego dziecka i przechowywanie ich podpisanych. Jeśli nie jest to możliwe, dokładnie wyczyść końcówkę przed każdym użyciem, tak jak opisano powyżej.