

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/laktator-elektroniczny-bocioland-emma-wkladki-laktacyjne-100-sztuk-gratis-p-54201.html>



Laktator elektroniczny Bocioland EMMA + wkładki laktacyjne 100 sztuk GRATIS

Cena	185,44 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Kod EAN	5904501651004
Producent	Bocioland

Opis produktu



LAKTATOR
elektroniczny
Electric BREAST PUMP

EMMA

Kiedy warto korzystać z laktatora?



- dla pobudzenia laktacji (np. po cesarskim cięciu)



- przy zastojach i obrzękach piersi



- dziecko i mama są rozdzieleni, dla podtrzymania laktacji



- mama wraca do pracy lub wychodzi z domu, a dziecko nadal otrzymuje jej pokarm



- mama chce zrobić zapas mleka na później



- kiedy dziecko przybiera za mało, aby sprawdzić ile dokładnie zjada

Laktator naśladuje sposób ssania dziecka, stymulując brodawkę do wypływu pokarmu



3- fazowość
(faza prolaktacji,
faza masażu, faza ssania)




Stopniowo zwiększa
szybkość odciągania



Stymuluje brodawkę

**SPERSONALIZOWANE
UŻYCIE**
(szeroki wybór ustawień,
możliwość indywidualnego
dopasowania)

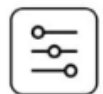

3 fazy pracy
3 programs




9 poziomów mocy
9 suction power settings

CICHA PRACA
(możesz używać nawet kiedy
maluch śpi)



Ciche działanie
Silence work

Objaśnienie panelu sterowania

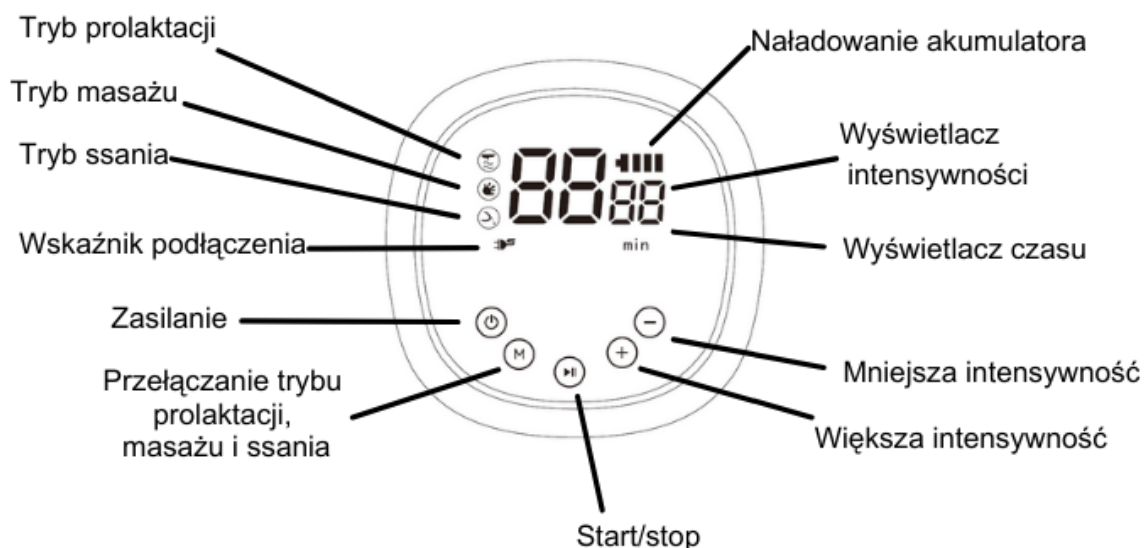

Nasze laktatory zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu mamy podczas karmienia piersią. Karmienie wyłącznie mlekiem mamy zalecane jest do 6 miesiąca życia, a później wraz z pokarmami stałymi do 2 roku życia. **Korzyści z karmienia dziecka mlekiem mamy:** dla dziecka:

- odżywia,
- przyczynia się do prawidłowego rozwoju;
- wzmacnia odporność: chroni przed

dla mamy:

- zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka sutka, jajników i osteoporozy w starszym wieku;

-
- infekcjami, zmniejsza ryzyka wielu chorób;
 - przyspiesza zdrowienie;
 - uspakaja i koi;
 - każdorazowe karmienie podnosi poziom oksytocyny – „hormonu miłości”, co wspomaga nawiązywanie więzi.
- szybsze obkurczanie macicy oraz zmniejszenie ryzyka krwotoku poporodowego i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza;
 - wydzielanie oksytocyny podczas karmienia sprzyja właściwej opiece i nawiązaniu prawidłowych relacji z dzieckiem oraz zmniejszenie napięcia i stresu u kobiety.

Po co mi laktator?

- Dla pobudzenia laktacji, kiedy naturalnie piersi produkują za mało pokarmu;
- Przy zbyt dużej ilości pokarmu, aby nadmiar mleka nie spowodował niedrożności kanalików mlekowych i zapalenia piersi, przy problemach z bólem podczas karmienia.
- Kiedy kobieta chce wrócić do aktywności zawodowej, nie rezygnując z podawania naturalnego pokarmu.
- W sytuacjach kiedy dziecko i mama są rozdzieleni, np. wcześniak zostaje w szpitalu lub mama choruje.
- Kiedy dziecko przybiera za mało, aby sprawdzić, ile dokładnie zjada.

Laktator potrzebny jest przy metodzie KPI (Karmienie piersią inaczej).

Jest to sposób na karmienie naturalnym mlekiem z piersi, ale przez inne osoby. Mama odciąga pokarm laktatorem, następnie jest on podawany dziecku butelką.

Laktator elektroniczny Bocioland Emma

Posiada 3 tryby pracy. W każdym z nich można regulować intensywność pracy na 9 poziomach. -Przed rozpoczęciem odprowadzania pokarmu, laktator elektroniczny Emma pobudza gruczoły mlekowe piersi, zapewniając lepszy przepływ mleka - jest to tryb prolaktacji. -Tryb masażu pomaga zapobiegać zastojom w piersiach i ułatwia płynny wypływ mleka. -Tryb ssania imituje rytm i intensywność ssania piersi przez dziecko. Można dostosować go pod własne preferencje, aby pobudzić laktację lub spowolnić ją. **Gotowy do użycia w każdej sytuacji.** Laktator bezprzewodowy jest łatwy do użycia w każdej sytuacji. Gotowy do użytku zaraz po wyjęciu z opakowania (przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję obsługi!) w zestawie jest butelka na mleko i smoczek. Pozwala to korzystać z niego w każdej sytuacji: w domu, w pracy, w podróży...

Łatwe ładowanie.

Akumulator laktatora jest ładowany poprzez przewód USB, dzięki temu możesz naładować go wszędzie za pomocą Twojego powerbanku.

Czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz dotykowy.

Silnik laktatora w delikatnym różowym kolorze z akcentami różowego złota.

Łatwa sterylizacja.

Elementy laktatora należy regularnie czyścić i poddawać dezynfekcji. Możesz zrobić to z użyciem wrzącej wody lub sterylizatora parowego, którego używasz do dezynfekcji butelek na mleko dla dziecka.

Cichy Możesz użyć go kiedy masz potrzebę opróżnić piersi z pokarmu, a Twoje dziecko śpi. Jego cicha praca jest łagodna dla otoczenia.