

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/laktator-elektryczny-individual-z-5-ma-trybami-pracy-babyono-406-elektroniczny-odciagacz-pokarmu-p-34246.html>



## Laktator elektryczny INDIVIDUAL z 5-ma trybami pracy BabyOno 406 elektroniczny odciągacz pokarmu

Cena	<b>359,80 zł</b>
Cena poprzednia	<b>399,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Baby Ono 406</b>
Producent	<b>Babyono</b>

### Opis produktu

Laktator elektryczny NATURAL NURSING zapewnia wysoki komfort oraz wydajność użytkowania. Lejek wykonany z miękkiego silikonu obejmuje całą pierś pod każdym kątem, także w pozycji półleżącej. Zapewnia to większą wygodę dla świeżo upieczonych mam, w szczególności po cesarskim cięciu.

Jest bardzo skuteczny, gdyż dopasowana siła ssania pozwala szybko i wydajnie ściągnąć pokarm. Jego cichy tryb pracy zapewnia dyskrecję, co umożliwi odprowadzanie mleka w każdym miejscu. Laktator jest prosty w obsłudze, montażu, jak i demontażu, dyskretny i wygodny w podróży, zasilany baterią akumulatorową, możliwość karmienia butelką Natural Nursing zaraz po odciążeniu.

Laktator wyposażony jest w baterię akumulatorową. W celu naładowania podłącz pompę laktatora do ładowarki, a następnie do gniazda prądowego. Pełne ładowanie trwa około 5h, po pełnym naładowaniu laktator będzie działać około 2,5h.

Jeśli po uruchomieniu pompy laktatora w ciągu 1 minuty nie rozpocznie się odciągania pokarmu, pompa wyłączy się automatycznie. Domyślny czas pracy pompy wynosi 30 minut. Po przepracowaniu 30 minut laktator wyłącza się automatycznie.

Wszystkie elementy laktatora wykonane są ze specjalnego tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością, nie zawierającego Bisfenolu A.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

Laktator Babyono INDIVIDUAL oferuje 5 różnych trybów, które mamy mogą dopasować do swoich indywidualnych potrzeb:

Masaż pobudzający.

Zalecane jest uruchomienie masażu pobudzającego na 2-5 minut przed ociąganiem pokarmu.

#### Tryb 2 w 1.

Cykl złożony z 5 ruchów masujących, po których następuje 1 ruch ssący.

Tryb ten zalecany jest do kojenia bólu przepiętnych piersi i ich pobudzania w celu odciągania większej ilości pokarmu w krótszym czasie.

Tryb odciąganie.

Siłę ssania można ustawić w zakresie od L1 do L7. Poszczególne poziomy różnią się siłą ssania, od niskiej do wysokiej.

Tryb podwójnej częstotliwości

Tryb łączący zalety naprzemiennego ssania z dużą i małą siłą. Cykl ssania o zmiennej sile (słabo - przerwa - mocno) skutecznie pomaga w pobudzaniu wklęsłych brodawek.

Tryb wysokiej częstotliwości

Dając przyjemność odciąganie pokarmu z jednoczesnym stymulowaniem piersi w celu pobudzania odruchu oksytocynowego zwiększającego prędkość wypływu pokarmu.

#### DANE TECHNICZNE:

- 
- laktator
  - silikonowy lejek
  - butelka do karmienia Babyono Natural Nursing - 180 ml
  - silikonowy smoczek anatomiczny 0m+
  - ładowarka
  - kosmetyczka - GRATIS
  - 2 w 1 pojemnik na mleko i laktator ręczny - **GRATIS**