

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/laktator-podwojny-elektryczny-expresscare-z-aspiratorem-do-nosa-canpol-babies-12212-odciagacz-pokarmu-na-dwie-piersi-p-50117.html>



Laktator podwójny elektryczny ExpressCare z aspiratorem do nosa Canpol Babies 12/212 odciągacz pokarmu na dwie piersi

Cena	299,00 zł
Cena poprzednia	329,00 zł
Numer katalogowy	Laktator elektroniczny mleka na 2 piersi
Producent	Canpol babies

Opis produktu

Podwójny laktator elektryczny ExpressCare to bezprzewodowy laktator na dwie piersi do częstego, szybkiego i bezbolesnego odciągania. Doskonały dla mam Karmiących Piersią Inaczej (KPI) – mlekiem odciągniętym z butelki, dla mam karmiących naprzemiennie, dla mam bliźniaków i aktywnych mam wracających do pracy, które nie chcą rezygnować z karmienia piersią.

Podwójny laktator elektryczny ExpressCare jest urządzeniem 2w1 z funkcją elektrycznego aspiratora do nosa.

Laktator ExpressCare ma 3 tryby pracy wzorowane na naturalnym dwufazowym rytmie ssania dziecka. W pierwszej fazie stymuluje i pobudza, zapewniając szybszy wypływ pokarmu, a następnie przechodzi w wolniejszy i głęboki tryb ssania mleka. Trzeci tryb może być używany pod koniec odciągania pokarmu, aby pomóc opróżnić pierś i wspierać laktację. Laktator ExpressCare posiada szeroki zakres regulacji siły ssania, po 9 poziomów siły ssania w każdym trybie, dzięki czemu pozwala na dostosowanie mocy do potrzeb każdej kobiety, aby odciąganie pokarmu było komfortowe. Dodatkowo jest możliwość ustawienia indywidualnego trybu odciągania dla każdej piersi. Laktator elektryczny ExpressCare jest dyskretny i bardzo cichy – tylko 40 decybeli*, co umożliwi odciąganie mleka również w nocy bez obawy, że obudzisz dziecko.

Naładowany laktator można zabrać ze sobą wszędzie i używać bezprzewodowo, nawet gdy nie masz gniazdka zasilania w pobliżu. Pełna bateria zapewnia do 120 minut bezprzewodowej pracy (3-4 użycia). Akumulator jest ładowany za pomocą kabla USB, dzięki czemu można naładować go również poprzez powerbank, jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozładowaniem, kiedy jesteś poza domem.

Ergonomiczny kształt lejka dopasowuje się do różnych kształtów piersi, tak aby proces odciągania mleka przypominał ten naturalny. Lejek z miękką, wyprofilowaną nakładką masującą wykonaną z delikatnego silikonu nie podrażnia wrażliwych brodawek i zwiększa komfort podczas odciągania pokarmu.

Laktator ExpressCare posiada funkcję korekcji sutków, która pomaga uformować wklęsłą brodawkę, aby ułatwić przystawianie maluszka do piersi i wspierać utrzymanie prawidłowej laktacji.

Dotykowy panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem jest łatwy w obsłudze, który informuje o włączonym trybie, stopniu mocy oraz poziomie naładowania baterii. Podwójny laktator elektryczny ExpressCare możesz używać zarówno do odciągania pokarmu z dwóch, jak i z jednej piersi.

Laktator jest zbudowany z niewielkiej ilości elementów, co ułatwia jego mycie oraz montaż. Wszystkie jego części są pozbawione zawartości szkodliwego BPA (bisfenolu A), co sprawia, że jest w pełni bezpieczny dla zdrowia i nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością, w tym również z mlekiem matki.

Do laktatora ExpressCare dołączone są dwie butelki antykolkowe EasyStart o pojemności 120ml – aż 90% położnych poleca smoczek do butelki EasyStart.** Laktator jest kompatybilny ze wszystkimi butelkami z oferty Canpol babies, dzięki czemu możesz dopasować pojemność butelki do wieku i potrzeb dziecka.

Podwójny laktator elektryczny ExpressCare jest urządzeniem 2w1 z funkcją elektrycznego aspiratora do nosa, który w kilka sekund oczyści nos dziecka i umożliwi mu swobodne oddychanie. W zestawie znajdują się 2 wymienne silikonowe końcówki

dopasowane do wieku i rodzaju kataru – z wąską końcówką stosowana u małych dzieci lub płynnej wydzieliny i szersza przeznaczona do większych dziurek lub do używania przy gęstej wydzielinie. Miękki i bezpieczny silikon, z którego zostały wykonane końcówki, C23chroni błonę śluzową nosa, zapobiegając jej uszkodzeniu podczas nagłych ruchów dziecka.

W ofercie Canpol babies jest dostępny wymienny lejek w rozmiarze 27 mm. Odpowiedni rozmiar lejka ma istotny wpływ na komfort i skuteczność odciągania pokarmu. Lejek do laktatorów z elastycznym brzegiem jest idealny dla mamy z większą brodawką.

*Przykładowy poziom natężenia dźwięku: 40-45 dB lodówka, 58 dB kuchenka mikrofalowa, 60 dB zmywarka do naczyń.

**Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 54 położnych w 2021 roku.

Podwójny laktator elektryczny ExpressCare pasuje do wszystkich butelek szerokich antykolkowych i standardowych Canpol babies.

Zestaw zawiera: silikonową nakładkę masującą x2, korpus laktatora x2, silikonowy zaworek antyzwrotny x2, butelkę x2, osłonę lejka x2, silikonową rurkę x2, łączniki rurki x4, pompę z panelem sterowania, kapsel do butelki x2, smoczki do butelki x2, nakrętkę smoczka x2, dysk uszczelniający x2, adapter do butelek x2, zasilacz sieciowy, przewód ładowania z USB. Do laktatora są dołączone dwie silikonowe końcówki, które odpowiednio zamontowane do przewodu laktatora służą jako elektryczny aspirator do nosa.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Laktator jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy – nie wymaga stosowania baterii typu AA, ani stałego podłączenia do sieci elektrycznej.

Ładowanie akumulatora odbywa się za pomocą zasilacza sieciowego. W celu naładowania podłącz jedną stronę przewodu ładowania do pompy laktatora, drugą część do zasilacza sieciowego, a następnie do gniazdka sieciowego. Pełne ładowanie będzie trwało około 180 minut. Kiedy akumulator będzie w pełni naładowany, diody stanu baterii przestaną migać. Po całkowitym naładowaniu, przestań ładować, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. W celu wydłużenia żywotności baterii nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora. Praca urządzenia po pełnym naładowaniu będzie trwać około 180 minut. Laktator posiada wbudowany timer, po 30 minutach pracy wyłącza się automatycznie. Jeśli chcesz wznowić pracę urządzenia, naciśnij przycisk on/off. Przed każdym użyciem umyj dokładnie ręce zanim skorzystasz z laktatora.

Upewnij się, że w silikonowym przewodzie nie znajdują się żadne zanieczyszczenia, płyn czy ślady wilgoci. Nigdy nie włączaj urządzenia, jeśli zauważysz, że w przewodzie znajduje się woda. Uwaga! Nie przedmuchiuj ustami przewodu w celu usunięcia wody.

Przyłóż laktator do piersi, tak aby brodawka znajdowała się głęboko wewnątrz lejka (dokładnie po środku). **UWAGA!** Istotne jest, aby silikonowa nakładka szczelnie przylegała do piersi, w przeciwnym razie siła ssania może ulec osłabieniu.

UWAGA! Odstawiając laktator od piersi upewnij się, że nie jest włączony. Jeżeli zajdzie taka konieczność, można odstawić laktator w trakcie pompowania wkładając palec pomiędzy tarczę a pierś (tak jak odstawia się od piersi dziecko).

Po zakończeniu odciągania pokarmu odłącz pompę laktatora wraz z rurką silikonową. Zdemontuj elementy laktatora. Przed pierwszym i po każdym użyciu, umyj wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem, tj. nasadka membrany, membrana, korpus laktatora z lejkiem, silikonowa nakładka masująca, osłona lejka, zaworek silikonowy, adapter do butelek oraz butelka w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego, a następnie umieść na 5 minut we wrzącej wodzie w celu zapewnienia higieny. Uwaga! Nie pozostawiaj elementów na dnie garnka. Mieszaj wodę w trakcie dezynfekowania, aby zapobiec uszkodzeniu elementów.

Przed użyciem dokładnie osusz wszystkie elementy. **UWAGA!** Pompa laktatora, wężyki silikonowe z łącznikami rurki oraz zasilacz sieciowy wraz z kablem USB nie mogą być myte i dezynfekowane w wodzie. W celu wyczyszczenia przetrzyj suchą ściereczką.

Silikonowe elementy mające kontakt z mlekiem tj. membrana, silikonowa nakładka masująca, zaworek silikonowy można dezynfekować w sterylizatorze elektrycznym.



Doskonały dla mam Karmiących Piersią Inaczej (KPI) i karmiących naprzemiennie.



2w1 - elektryczny aspirator nosa w zestawie.



Bardzo cichy tryb pracy - tylko 40 dB* zapewnia komfort przy nocnym odciąganiu.



Do 120 minut bezprzewodowej pracy (3-4 użycia).



3 tryby pracy - wzorowane na naturalnym dwufazowym rytmie ssania dziecka.



27 ustawień siły ssania – szeroki zakres regulacji siły ssania.



Personal fit – możliwość ustawienia indywidualnego trybu odciągania dla każdej piersi.



Wygodne ładowanie – sieciowe, za pomocą kabla USB lub powerbank.



Korekcja sutków – pomagają uformować wklęsłą brodawkę.



Ergonomiczny kształt lejka – dopasowuje się do różnych kształtów piersi.



Intuicyjny dotykowy panel sterowania – łatwy w obsłudze.



Dostępny wymienny lejek w rozmiarze 27 mm – odpowiedni rozmiar lejka ma istotny wpływ na komfort i skuteczność odciągania pokarmu.

express
CARE

For frequent, quick
& painless pumping

canpol
babies



DOUBLE ELECTRIC BREAST PUMP

Podwójny laktator elektryczny /
Молокоотсос
с электрическим приводом

 120 minutes
wireless work



+ electric
nasal
aspirator

+ elektryczny aspirator
do nosa / + электрический
назальный аспиратор



27 suction
power
settings

27 ustawień siły ssania /
27 уровней интенсивности
ссезивания



3
phases
of work

3 tryby pracy /
3 фазы
ссезивания

Very quiet
mode –
only 40 dB*

Bardzo cichy tryb
pracy – tylko 40 decybeli* /
Очень тихий – всего
40 дБ*



USB

POŁOŻNA POLECA

Doskonały dla mam Karmiących Piersią Inaczej (KPI) – mlekiem odciągniętym z butelki, dla mam karmiących naprzemiennie, mam bliźniaków i wracających do pracy.



Katarzyna Orawiec-Rymszewicz
położna i edukatorka laktacyjna,
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.



**Idealny do częstego, szybkiego
i bezbolesnego odciągania pokarmu.**




2w1 – z elektrycznym aspiratorem do nosa



**Bardzo cichy tryb pracy
– tylko 40 dB* zapewnia komfort
przy nocnym odciążaniu.**

*Przykładowy poziom natężenia dźwięku: 40-45 dB lodówka, 58 dB mikrofalówka, 60 dB zmywarka do naczyń.

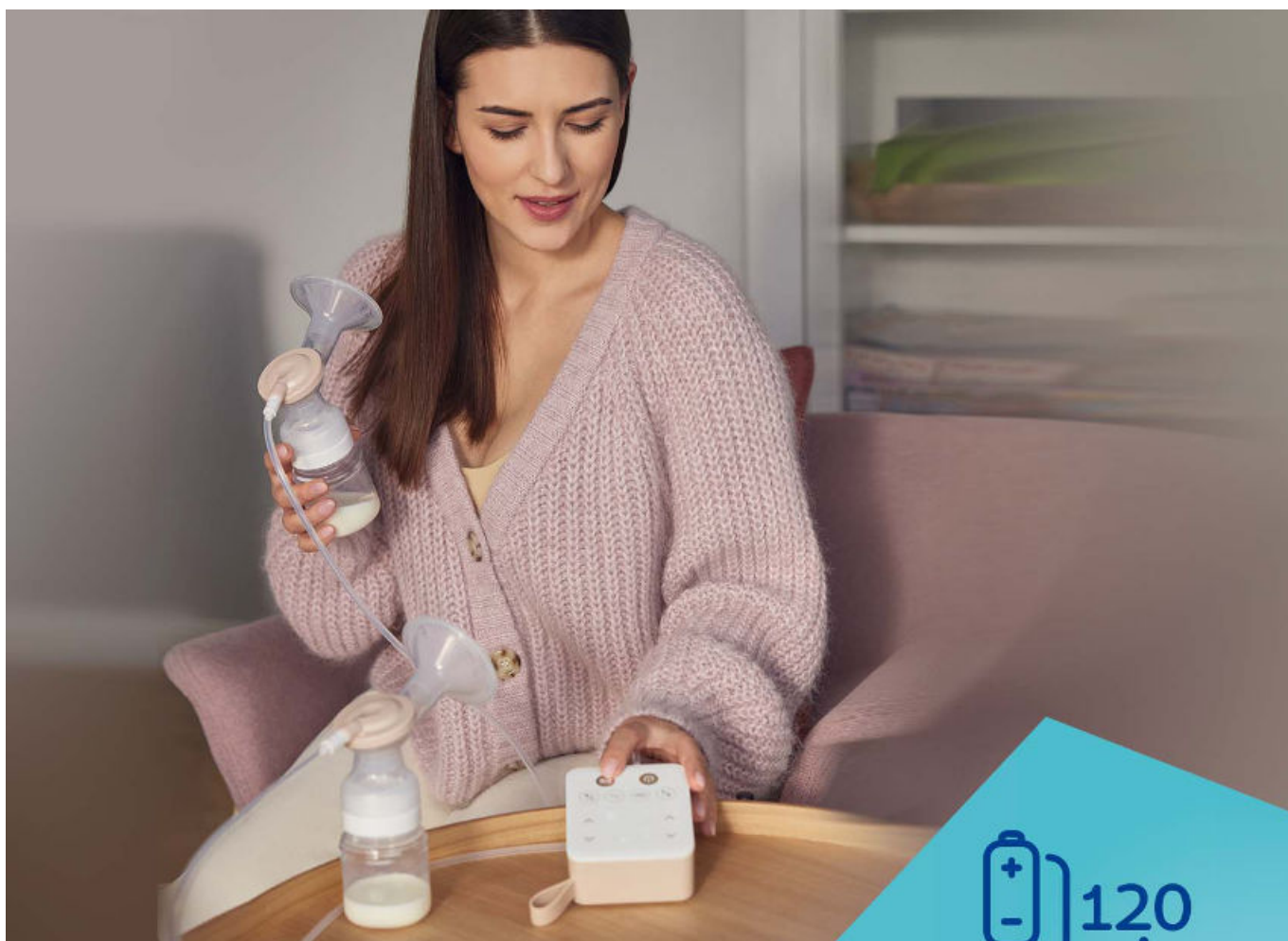

 120
min

**Do 120 minut bezprzewodowej pracy
(3-4 użycia) – komfort w domu i w podróży.**



**27 ustawień – szeroki zakres regulacji
siły ssania.**



Personal fit – możliwość ustawienia indywidualnego trybu odciągania dla każdej piersi.



Wygodne ładowanie sieciowe, za pomocą kabla USB lub powerbank.



**Korekcja sutków – pomaga uformować
wklęsłą brodawkę.**



Ergonomiczny kształt lejka – dopasowuje się do różnych kształtów piersi.



Dostępny wymienny lejek 27 mm – idealny dla mamy z większą brodawką.



Laktator elektryczny

MÓJ WYBÓR

Anna Deresowska



2x

