

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/mobilny-laktator-elektryczny-takego-canpol-babies-12211-bezprzewodowy-odciagacz-pokarmu-p-50124.html>



Mobilny laktator elektryczny Take&Go Canpol Babies 12/211 bezprzewodowy odciągacz pokarmu

Cena	199,00 zł
Cena poprzednia	229,00 zł
Numer katalogowy	Laktator elektroniczny do mleka
Producent	Canpol babies

Opis produktu

Mobilny laktator elektryczny Take&Go to bezprzewodowy i cichy laktator dla każdej mamy – wygodny do odciągania pokarmu także nocą. Doskonale do skutecznego wspomaganie laktacji, zarówno po porodzie fizjologicznym, jak i cesarskim cięciu.

Laktator Take&Go jest dwufazowy, co oznacza, że praca laktatora jest odwzorowaniem naturalnego rytmu ssania dziecka – najpierw stymuluje i pobudza zapewniając szybszy wypływ pokarmu, a następnie przechodzi w wolniejszy i głębszy tryb ssania mleka. Laktator posiada szeroki zakres regulacji siły ssania, po 9 poziomów siły ssania w każdym trybie, dzięki czemu pozwala na dostosowanie mocy do indywidualnych potrzeb każdej mamy, aby odciąganie pokarmu nie było bolesne. Laktator elektryczny Take&Go jest dyskretny i bardzo cichy – tylko 40 decybeli*, co umożliwi odciąganie mleka również w nocy bez obawy, że obudzisz dziecko.

Naładowany laktator można zabrać ze sobą wszędzie i używać bezprzewodowo, nawet gdy nie masz gniazdka zasilania w pobliżu. Pełna bateria zapewnia do 120 minut bezprzewodowej pracy (3-4 użycia). Akumulator jest ładowany za pomocą kabla USB, dzięki czemu można naładować go również poprzez powerbank, jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozładowaniem, kiedy jesteś poza domem.

Ergonomiczny kształt lejka dopasowuje się do różnych kształtów piersi, tak aby proces odciągania mleka przypominał ten naturalny. Lejek z miękką, wyprofilowaną nakładką masującą wykonaną z delikatnego silikonu nie podrażnia wrażliwych brodawek i zwiększa komfort podczas odciągania pokarmu. Laktator wyposażony jest w czytelny wyświetlacz, który informuje o włączonym trybie, stopniu mocy oraz poziomie naładowania baterii. Dotykowy panel sterowania jest łatwy w obsłudze i zapamiętuje ostatnio używane ustawienia.

Laktator elektryczny Canpol babies Take&Go jest zbudowany z niewielkiej ilości elementów, co ułatwia jego mycie oraz montaż. Wszystkie części są pozbawione zawartości szkodliwego BPA (bisfenolu A), co sprawia, że jest w pełni bezpieczny dla zdrowia i nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością, w tym również z mlekiem matki.

Do laktatora Take&Go jest dołączona butelka antykolkowa EasyStart o pojemności 120ml – aż 90% położnych poleca smoczek do butelki EasyStart.** Laktator jest kompatybilny ze wszystkimi butelkami z oferty Canpol babies, dzięki czemu możesz dopasować pojemność butelki do wieku i potrzeb dziecka.

W ofercie Canpol babies jest dostępny wymienny lejek w rozmiarze 27 mm. Odpowiedni rozmiar lejka ma istotny wpływ na komfort i skuteczność odciągania pokarmu. Lejek do laktatorów z elastycznym brzegiem jest idealny dla mamy z większą brodawką.

*Przykładowy poziom natężenia dźwięku: 40-45 dB lodówka, 58 dB kuchenka mikrofalowa, 60 dB zmywarka do naczyń.

**Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 54 położnych w 2021 roku.

Mobilny laktator elektryczny Take&Go pasuje do wszystkich butelek szerokich antykolkowych i standardowych Canpol babies. Zestaw zawiera: silikonową nakładkę masującą, korpus laktatora, silikonowy zaworek antyzwrotny, butelkę, osłonę lejka, silikonową rurkę, łączniki rurki, pompę z panelem sterowania, kapsel do butelki, smoczek do butelki, nakrętkę smoczka, dysk uszczelniający, adapter do butelki, zasilacz sieciowy, przewód ładowania z USB.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Laktator jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy – nie

wymaga stosowania baterii typu AA, ani stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Ładowanie akumulatora odbywa się za pomocą zasilacza sieciowego. W celu naładowania podłącz jedną stronę przewodu ładowania do pompy laktatora, drugą część do zasilacza sieciowego, a następnie do gniazdka sieciowego. Pełne ładowanie będzie trwało około 120 minut. Kiedy akumulator będzie w pełni naładowany, diody stanu baterii przestaną migać. Po całkowitym naładowaniu, przestań ładować, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. W celu wydłużenia żywotności baterii nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora. Laktator można ładować w dowolnym momencie bez czekania na całkowite rozładowanie akumulatora. Praca urządzenia po pełnym naładowaniu będzie trwać około 90 minut. Laktator posiada wbudowany timer, po 30 minutach pracy wyłącza się automatycznie. Jeśli chcesz wznowić pracę urządzenia, naciśnij przycisk on/off. Przed każdym użyciem umyj dokładnie ręce zanim skorzystasz z laktatora. Upewnij się, że w silikonowym przewodzie nie znajdują się żadne zanieczyszczenia, płyn czy ślady wilgoci. Nigdy nie włączaj urządzenia, jeśli zauważysz, że w przewodzie znajduje się woda. Uwaga! Nie przedmuchiuj ustami przewodu w celu usunięcia wody.

Przyłóż laktator do piersi, tak aby brodawka znajdowała się głęboko wewnątrz lejka (dokładnie po środku). UWAGA! Istotne jest, aby silikonowa nakładka szczelnie przylegała do piersi, w przeciwnym razie siła ssania może ulec osłabieniu. UWAGA! Odstawiając laktator od piersi upewnij się, że nie jest włączony. Jeżeli zajdzie taka konieczność, można odstawić laktator w trakcie pompowania wkładając palec pomiędzy tarczę a pierś (tak jak odstawić się od piersi dziecko). Po zakończeniu odciągania pokarmu odłącz pompę laktatora wraz z rurką silikonową. Zdemontuj elementy laktatora. Przed pierwszym i po każdym użyciu, umyj wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem, tj. nasadka membrany, membrana, korpus laktatora z lejkiem, silikonowa nakładka masująca, osłona lejka, zaworek silikonowy, adapter do butelek oraz butelka w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego, a następnie umieść na 5 minut we wrzącej wodzie w celu zapewnienia higieny. Uwaga! Nie pozostawiaj elementów na dnie garnka. Mieszaj wodę w trakcie dezynfekowania, aby zapobiec uszkodzeniu elementów.

Przed użyciem dokładnie osusz wszystkie elementy. UWAGA! Pompa laktatora, wężyki silikonowe z łącznikami rurki oraz zasilacz sieciowy wraz z kablem USB nie mogą być myte i dezynfekowane w wodzie. W celu wyczyszczenia przetrzyj suchą ściereczką.

Silikonowe elementy mające kontakt z mlekiem tj. membrana, silikonowa nakładka masująca, zaworek silikonowy można dezynfekować w sterylizatorze elektrycznym.



Skutecznie wspomaga laktację, zarówno po porodzie fizjologicznym, jak i cesarskim cięciu.



Bardzo cichy tryb pracy – tylko 40 dB* zapewnia komfort przy nocnym odciąganiu.



Do 120 minut bezprzewodowej pracy (3-4 użycia).



Wygodne ładowanie sieciowe, za pomocą kabla USB lub powerbank.



2 fazowy - wzorowany na naturalnym rytmie ssania dziecka.



18 ustawień siły ssania - szeroki zakres regulacji siły ssania.



Lejek i wyprofilowana silikonowa nakładka masująca - zwiększa komfort podczas odciągania pokarmu i jest delikatna dla wrażliwych brodawek.



Dotykowy panel sterowania – łatwy w obsłudze i zapamiętuje ostatnio używane ustawienia.



Kompatybilny ze wszystkimi butelkami Canpol babies.



Dostępny wymienny lejek w rozmiarze 27 mm – odpowiedni rozmiar lejka ma istotny wpływ na komfort i skuteczność odciągania pokarmu.

take
& GO

Up to 120 minutes
of wireless pumping



canpol
babies

MOBILE ELECTRIC BREAST PUMP

Mobilny laktator elektryczny /
Молокоотсос
с электрическим приводом

Wireless



Profiled
shield

Wyprofilowana nakładka /
Профилированная
массажная накладка

18 suction
power
settings

18 ustawień siły ssania /
18 уровней интенсивности
сасеживания

2
phases
of work

2 tryby pracy /
2 фазы
сасеживания

Very quiet
mode –
only 40 dB*

Bardzo cichy tryb
pracy – tylko 40 decybel* /
Очень тихий – всего
40 дБ*



USB

POŁOŻNA POLECA

Skutecznie wspomaga laktację, zarówno po porodzie fizjologicznym, jak i po cesarskim cięciu.



Katarzyna Orawiec-Rymszewicz
położna i edukatorka laktacyjna,
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.



**Bardzo cichy tryb pracy
– tylko 40 dB* zapewnia komfort
przy nocnym odciąganiu.**

*Przykładowy poziom natężenia dźwięku: 40-45 dB lodówka, 58 dB mikrofalówka, 60 dB zmywarka do naczyń.



2 fazy - wzorowane na naturalnym rytmie ssania dziecka.



**Do 120 minut bezprzewodowej pracy
(3-4 użycia) – komfort w domu i w podróży.**



Wygodne ładowanie sieciowe, za pomocą kabla USB lub powerbank.



Lejek i wyprofilowana silikonowa nakładka masująca – delikatna dla wrażliwych brodawek.



**Intuicyjny dotykowy panel sterowania –
zapamiętuje ostatnio używane ustawienia.**



Dostępny wymienny lejek 27 mm – idealny dla mamy z większą brodawką.



Laktator elektryczny

MÓJ WYBÓR

Anna Deresowska

