

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/termofor-z-pestkami-wisni-cherry-niebieski-termoforek-z-pestek-wisni-dla-dzieci-babyono-79603-p-51845.html>



## Termofor z pestkami wiśni CHERRY niebieski termoforek z pestek wiśni dla dzieci Babyono 796/03

Cena	<b>25,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Termoforek dziecięcy</b>
Kod EAN	<b>5905317670074</b>
Producent	<b>Sensillo</b>

### Opis produktu

**Termofor z pestkami wiśni CHERRY** to produkt dla całej rodziny. Łagodzi dolegliwości związane z kolką u malucha, a także **bólem brzuszka**, siniakiem czy nabitym guzem u starszego dziecka. Przyniesie ulgę również mamie – w czasie bolesnej miesiączki, **zastoju pokarmu w piersiach** lub przy **migrenie**. Możesz używać go na ciepło, podgrzewając wkład w piekarniku, mikrofalówce lub na kaloryferze. Nadaje się jako kojący, zimny kompres – wystarczy, że schowasz go do zamrażarki. Termofor z pestek wiśni to **naturalny i bezpieczny produkt dla dzieci i dorosłych**.

W tej wersji pokrowiec termofora ma subtelny, niebieski kolor.

### Cechy

**WYSOKA JAKOŚĆ**



Produkt **wyprodukowaliśmy w Polsce**. Do przygotowania wkładu użyliśmy najwyższej jakości oczyszczonych pestek wiśni oraz suszoną lawendę.

**UKOJENIE**



**Lawenda**, którą dodaliśmy do termoforu ma właściwości kojące. Jej zapach zmniejsza uczucie stresu, łagodzi nastrój, pomaga zrelaksować się i zasnąć.

**BEZPIECZEŃSTWO**



Termofor z pestkami jest **bezpieczny dla dzieci i dorosłych**. Swoje ciepło oddaje w sposób naturalny, eliminując ryzyko poparzenia i uszkodzenia skóry. Nie zawiera płynów, które mogłyby ulec rozlaniu. **To certyfikowany wyrób medyczny.**

**WYGODA**




Wygodny, **szeroki otwór w pokrowcu** umożliwi Ci bezproblemowe włożenie podgrzanego lub schłodzonego wkładu termoforma do pokrowca.

**MIĘKKOŚĆ**



Termofoz z pestkami wiśni schowany jest w miękkim pokrowcu. Uszyliśmy go z **przyjemnej w dotyku tkaniny minky**. Bez problemu zachowasz higienę użytkowania – wystarczy ściągnąć pokrowiec i go wyprać.

#### NA CIEPŁO I ZIMNO

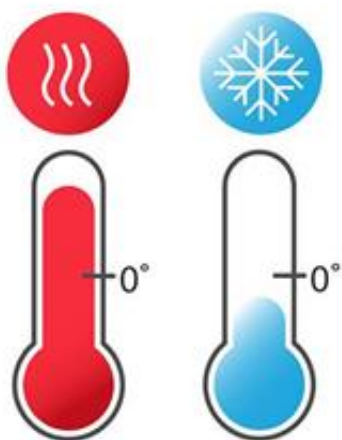

W zależności od potrzeb termofoz z pestkami wiśni możesz wykorzystywać do ciepłych lub zimnych okładów. Czy wiesz, że rozgrzejesz nim również dłonie po zimowym spacerze, a także schłodzisz kark w gorący dzień?

## Szerokie zastosowanie

Termofor z pestkami wiśni to produkt o szerokim zastosowaniu. Złagodzi wiele dolegliwości najmłodszych członków rodziny, a także ich rodziców.

### Na ciepło:

- łagodzi objawy kolek niemowlęcych i wzdęć
- pomaga rozluźnić mięśnie
- przynosi ulgę w bólach kręgosłupa i stawów
- koi objawy rwy kulszowej
- przynosi ulgę przy zapaleniu zatok
- łagodzi bóle menstruacyjne
- rozgrzewa piersi w okresie laktacyjnym
- rozgrzewa zimną pościel
- ogrzewa dłonie i stopy
- pomaga zasnąć
- poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie.

### Na zimno:

- pomaga zmniejszyć temperaturę przy gorączce
- łagodzi objawy migreny
- przynosi ulgę w bólach głowy
- koi piersi przy zastojach pokarmu
- zmniejsza obrzęk w przypadku skręceń, stłuczeń, guzów
- wspomaga przy leczeniu oparzeń i ukąszeń owadów.



## Sposoby podgrzewania i schładzania



microwave oven  
mikrofalówka  
микроволновая печь

600 W - 90 sek.



electric oven  
piekarnik  
печь

130 °C - 10 min.



freezer  
zamrażarka  
морозильник

30 min.

### Podgrzewanie

- Wyjmij wkład z pokrowca zewnętrznego
- Umieść wkład w kuchence mikrofalowej (600 W - 90 sek.), piekarniku(130° C - 10 min.) lub kaloryferze (aż będzie wystarczająco ciepły)
- Po podgrzaniu termoforu, delikatnie wymieszaj pestki i lawendę, sprawdź temp.na nadgarstku
- Założ ponownie pokrowiec.

### Schładzanie

- Wyjmij wkład z pokrowca zewnętrznego
- Umieść termofor w zamrażalniku (na około 30 minut). Pamiętaj, aby zabezpieczyć termofor przed kontaktem z żywnością
- Założ ponownie pokrowiec.

### WAŻNE

- Przechowuj termofor w suchym miejscu.
- Nigdy nie pierz wkładu razem z pestkami.
- Nie ogrzewaj pokrowca zewnętrznego.
- Nie używaj w przypadku uczulenia na którykolwiek materiał wchodzący w skład produktu.
- Nie stosuj rozgrzanego termoforu na choroby serca, żył, ostrych stanów zapalnych.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt nie posiada uszkodzeń. W przypadku zużycia/zabrudzenia wkładu wymień go na nowy.





To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Dane techniczne**

- Woreczek 100% bawełna z pestkami wiśni i suszoną lawendą 1 szt.
- Skład: 150 g pestek z wiśni, 0,5 g suszonej lawendy
- Instrukcja wewnątrz opakowania
- Po podgrzaniu oddaje ciepło do 1 godziny.
- Pokrowiec zewnętrzny z tkaniny minky (100% poliester). Można go prać ręcznie w temp 40°C.
- Wymiary produktu: 16 cm x 13 cm